

TELEMACHUS - TELEmedicine Monitoring And Collaborative HUB-and-spoke System



APPLICAZIONE TELEMACHUS MANUALE D'USO PER PAZIENTI

Capitolo 2

CONFIGURAZIONE PAZIENTE

2.1 App Login

2.2 Mobile App Homepage

2.2.1 Mobile Homepage – Modulo Consigli & Info

2.2.2 Mobile Homepage – La mia terapia

2.2.3 Mobile Homepage – Test e Dati

2.2.3.1 Carta del Rischio

2.2.3.2 Parametri Biometrici

2.2.3.3 Parametri Biometrici / Braccialetto

2.2.3.4 Storico

2.2.3.5 Ultime rilevazioni

2.2.4 Mobile Homepage – Agenda Appuntamenti


2.2.5 Mobile Homepage – Istruzioni Braccialetto

2.2.6 Mobile Homepage – Chat e Videocall

2.2.7 Mobile Homepage - Lifestyle

2.1 Paziente – Mobile App Login

2.1 - App Login

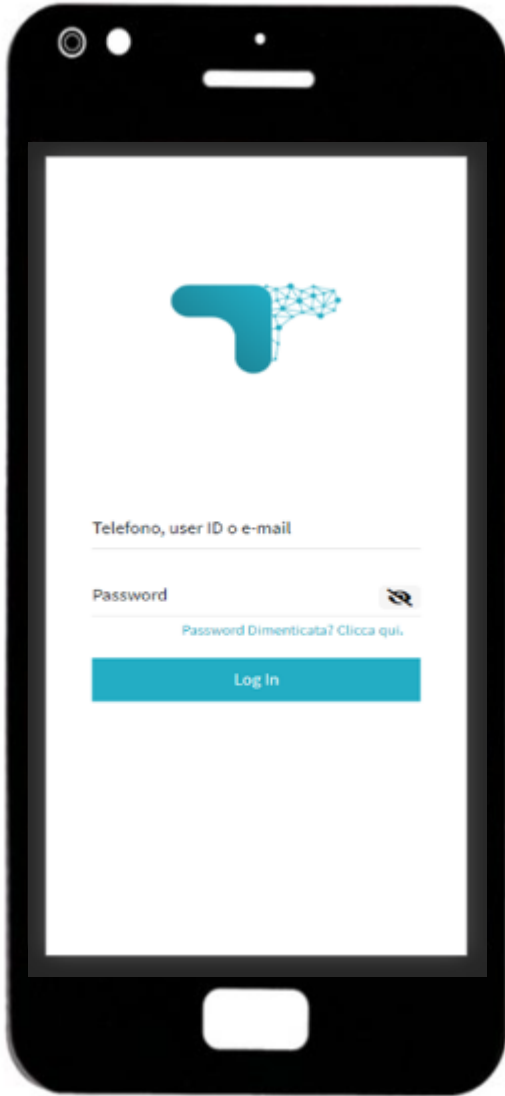

Il paziente riceve dal medico l'invito a scaricare l'App con le credenziali di accesso all'applicazione:

- Numero cellulare (personale)
- Password di accesso (fornitegli dalla Amministrazione Telemachus)


2.1 - App Login



Il paziente riceverà un codice OPT di verifica che dovrà inserire nell'apposito campo e dovrà pertanto:

- Inserire il codice di verifica
- Cliccare sul bottone “Verifica”
- Sottoscrive il GDPR

2.1 - App Login

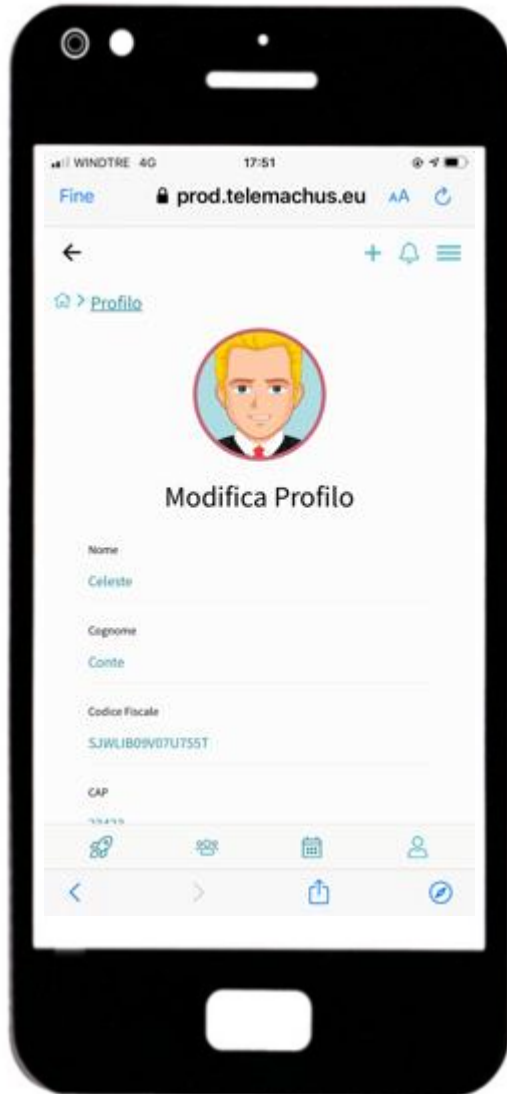


Primo accesso –Compilazione obbligatoria del Form con le informazioni personali

Il paziente completa il modulo relativo al profilo personale con i seguenti dati richiesti:

- Nome
- Cognome
- Codice Fiscale
- CAP
- Città
- Provincia

2.2 Paziente – Mobile App Home Page

2.2 - Mobile App Homepage

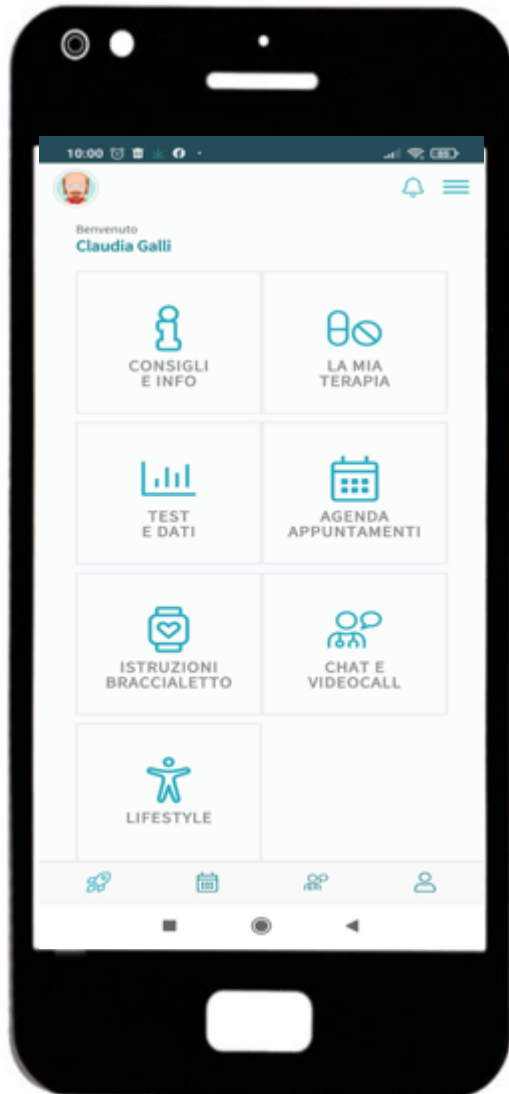


Completata la configurazione personale, il paziente può accedere con il proprio smartphone al menù dell'App Telemachus dove saranno presenti le seguenti aree selezionabili:

- CONSIGLI & INFO
- LA MIA TERAPIA
- TEST E DATI
- AGENDA APPUNTAMENTI
- ISTRUZIONI BRACCIALETTO
- CHAT E VIDEOCALL
- LIFESTYLE

2.2.1 Paziente – Consigli & Info


2.2.1 - Mobile App Homepage – Consigli & Info

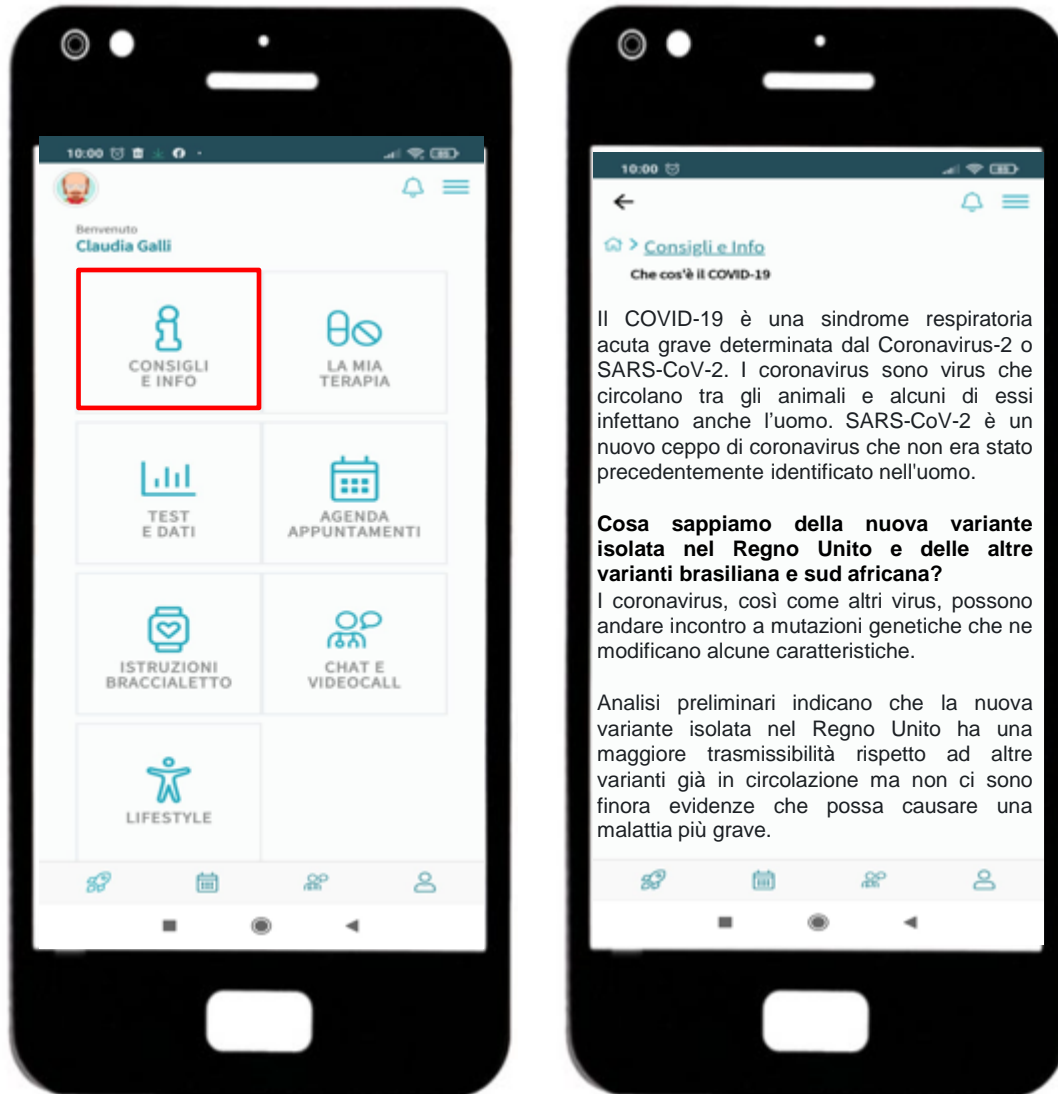

Il modulo **CONSIGLI & INFO** offre al paziente la possibilità di essere correttamente informato sulla malattia e sui principali provvedimenti ad essa correlati.

2.2.2 Paziente – La mia terapia

2.2.2 - Mobile App Homepage – La mia terapia

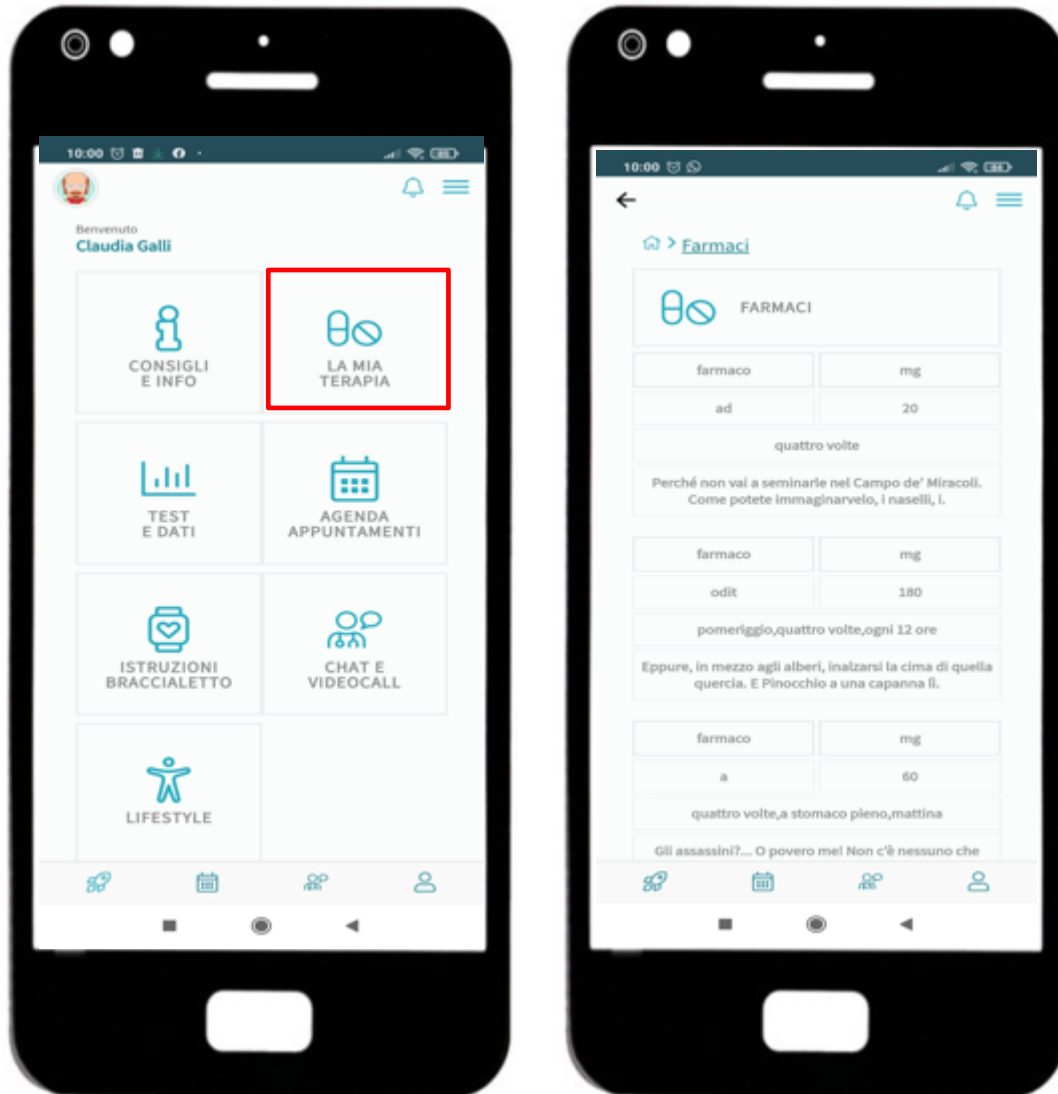

Cliccando su **LA MIA TERAPIA** il paziente ha la possibilità di consultare le terapie in corso prescritte la proprio medico e le modalità di assunzione.

2.2.3 Paziente – Test e Dati

2.2.4. 1 Carta del Rischio


2.2.4. 2 Parametri Biometrici

2.2.4. 3 Parametri Biometrici / Braccialetto

2.2.4. 4 Storico


2.2.4. 5 Ultime rilevazioni

2.2.3 - Mobile App Homepage – Test e Dati

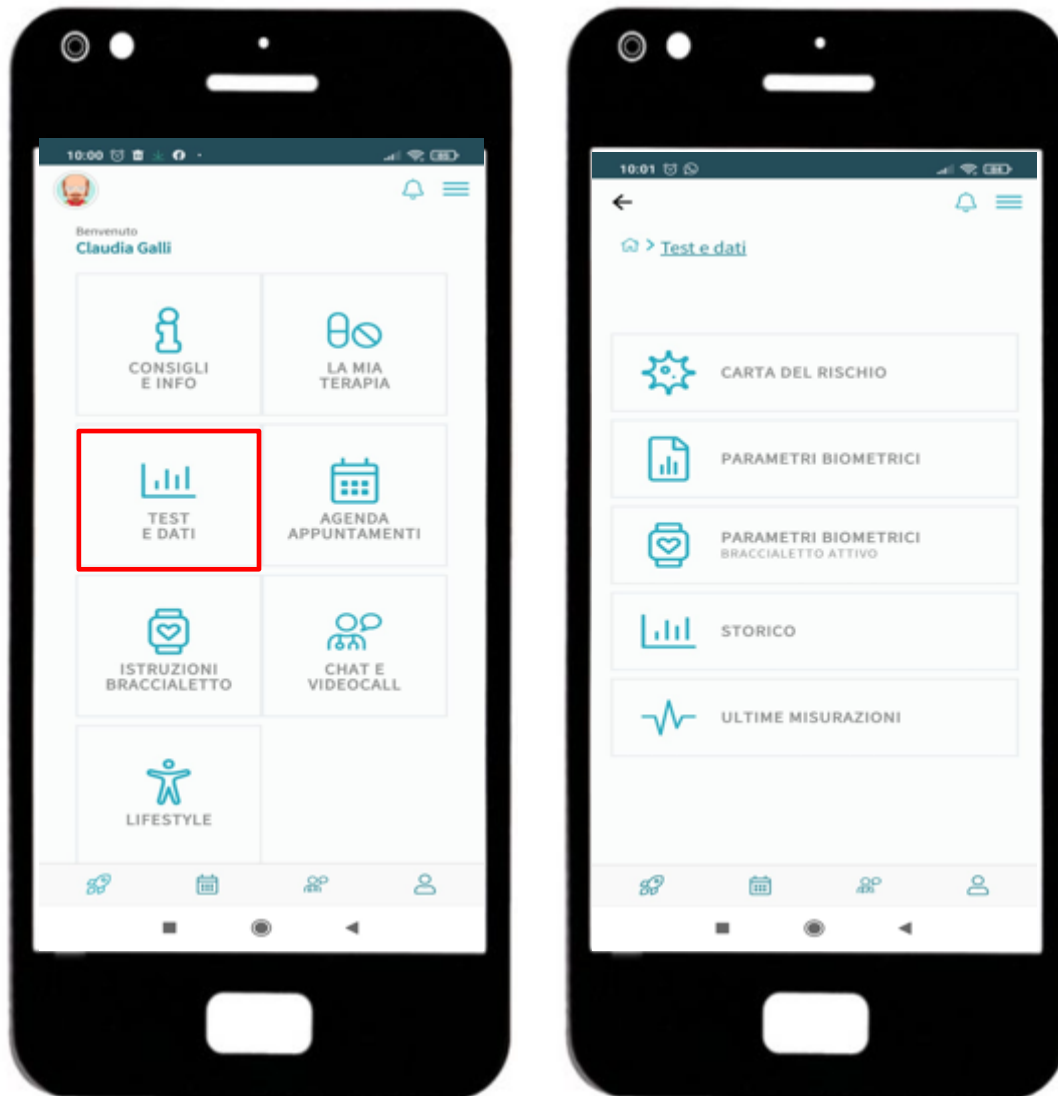

Cliccando su **TEST E DATI** compare l'elenco delle funzioni che il paziente ha la possibilità di utilizzare o consultare nel corso del periodo di monitoraggio da parte del proprio medico

2.2.3.1 - Mobile App Homepage – Test e Dati – Carta del Rischio

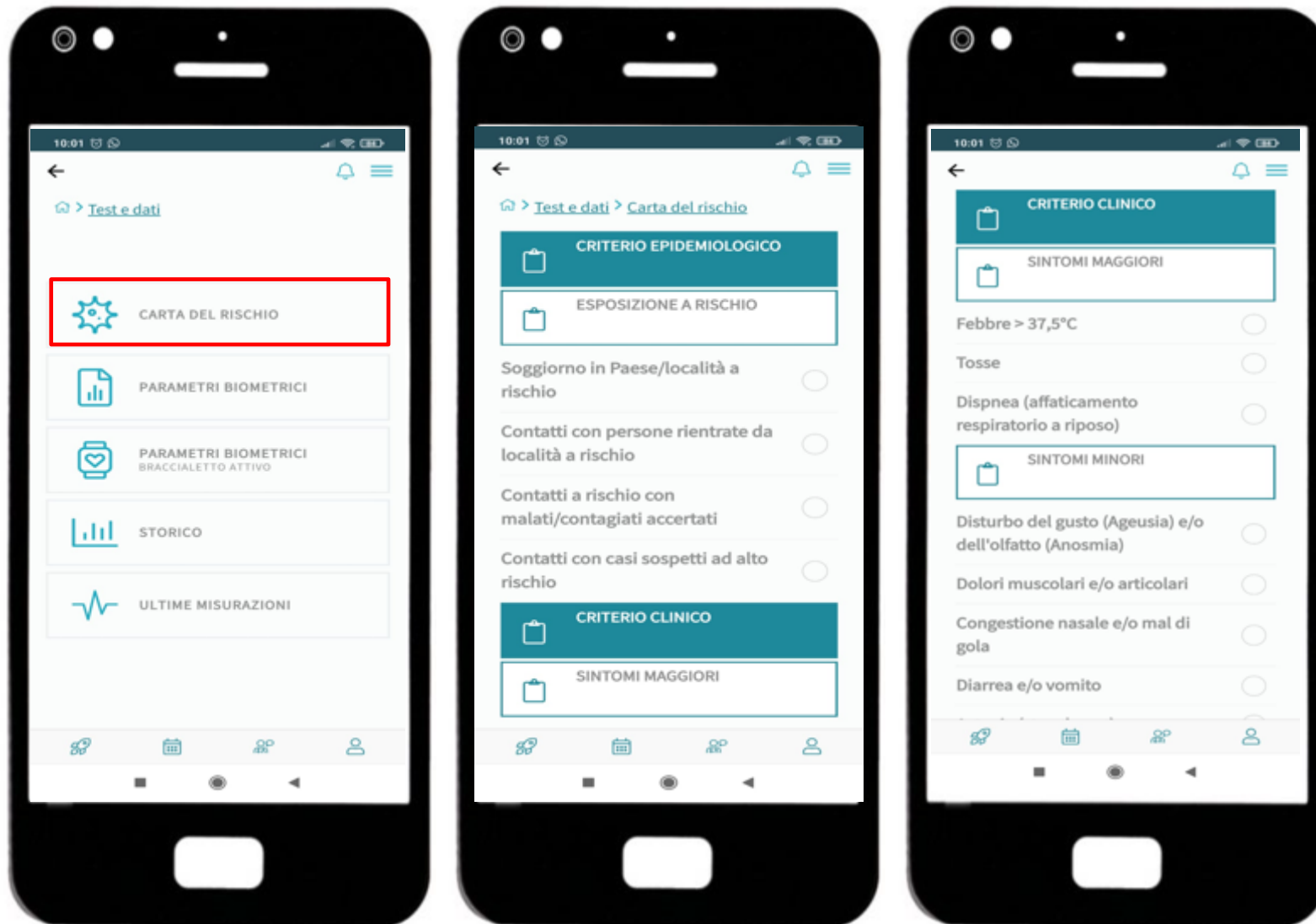


Cliccando su **CARTA DEL RISCHIO** compare l'elenco dei quesiti ai quali il paziente deve rispondere nel corso del periodo di monitoraggio.

I quesiti servono a valutare il rischio sulla base di:

CRITERIO EPIDEMIOLOGICO
per valutare il rischio di contagio
CRITERIO CLINICO
per valutare il rischio clinico

2.2.3.1 - Mobile App Homepage – Test e Dati – Carta del Rischio

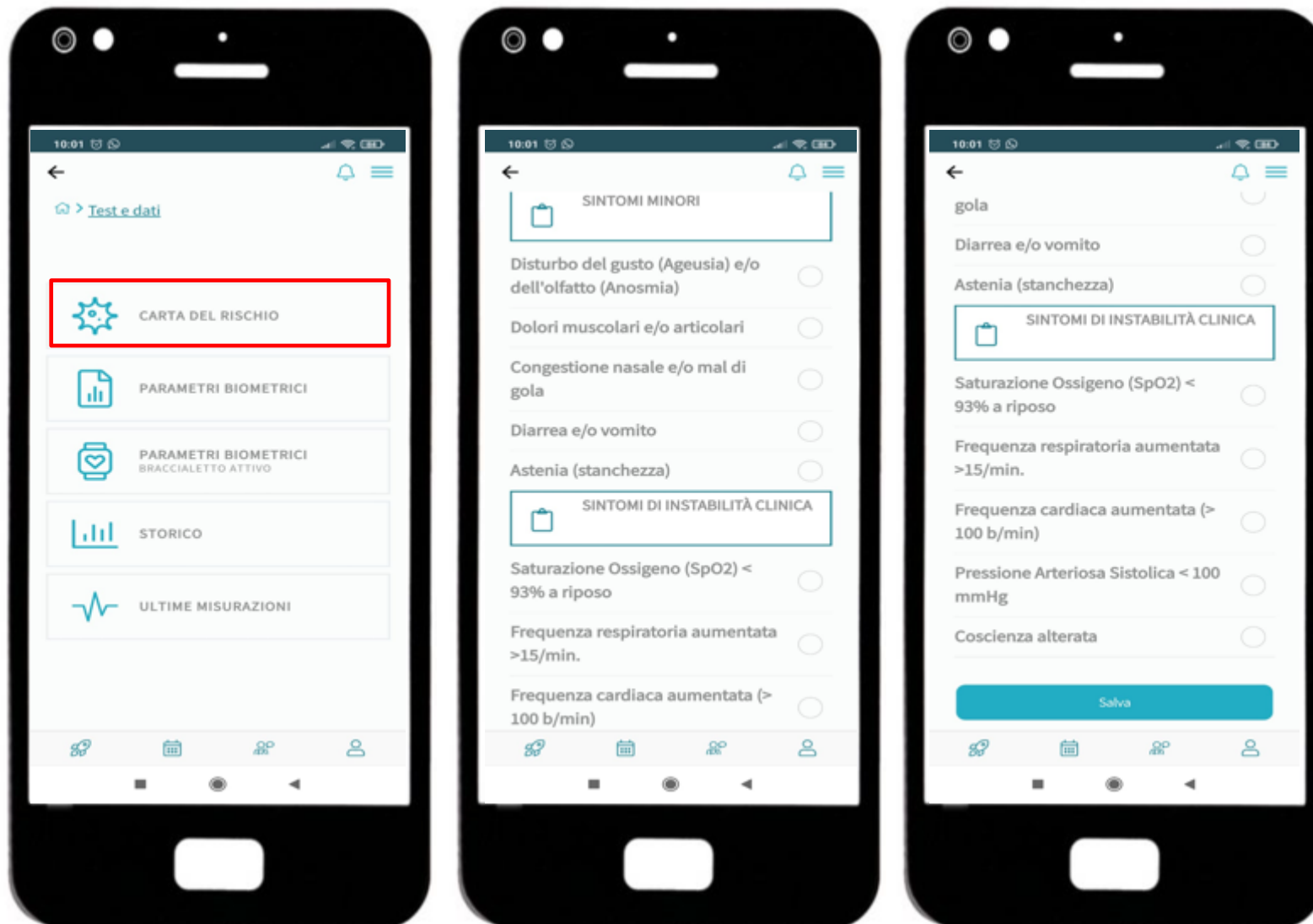


Completate le risposte ai quesiti della **CARTA DEL RISCHIO** viene calcolato automaticamente uno score di rischio che colloca il paziente in una fascia di rischio:

- **Basso**
- **Medio**
- **Medio Alto**
- **Alto**

Il controllo del profilo di rischio giornaliero è uno strumento di sintesi nella valutazione clinica del paziente

2.2.3.2 - Mobile App Homepage – Test e Dati – Parametri Biometrici

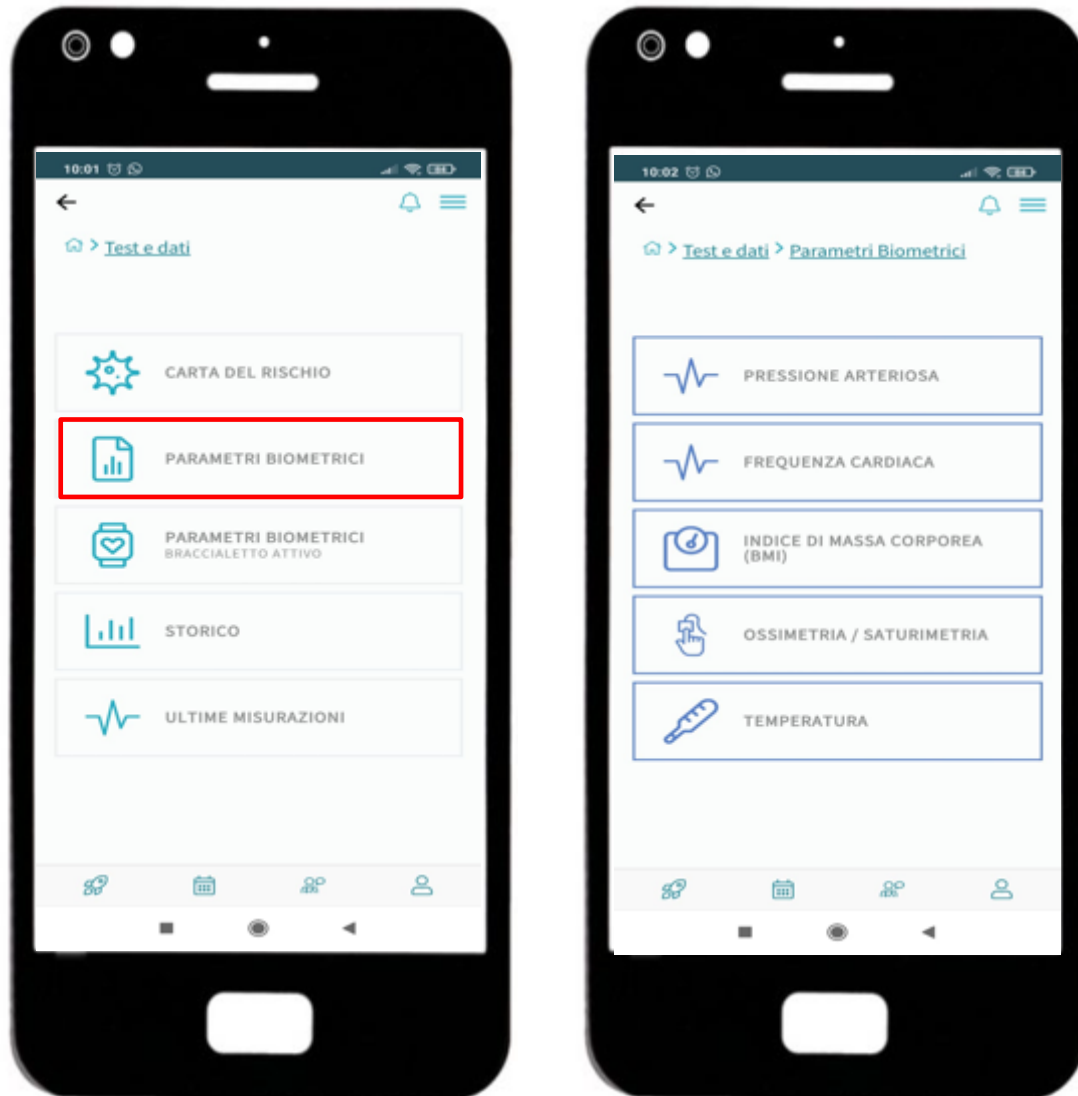


Cliccando su **PARAMETRI BIOMETRICI** compare l'elenco dei parametri che il paziente deve misurare nel corso del periodo di monitoraggio (quarantena o isolamento) e inserire nelle apposite sezioni:


- **PRESSIONE ARTERIOSA**
- **FREQUENZA CARDIACA**
- **OSSIMETRIA / SATURIMETRIA**
- **TEMPERATURA**

I valori dei parametri biometrici interessati (frequenza cardiaca, ossimetria, temperatura) sono automaticamente utilizzati dall'algoritmo di calcolo della CARTA DEL RISCHIO


2.2.3.2 - Mobile App Homepage – Test e Dati – Parametri Biometrici

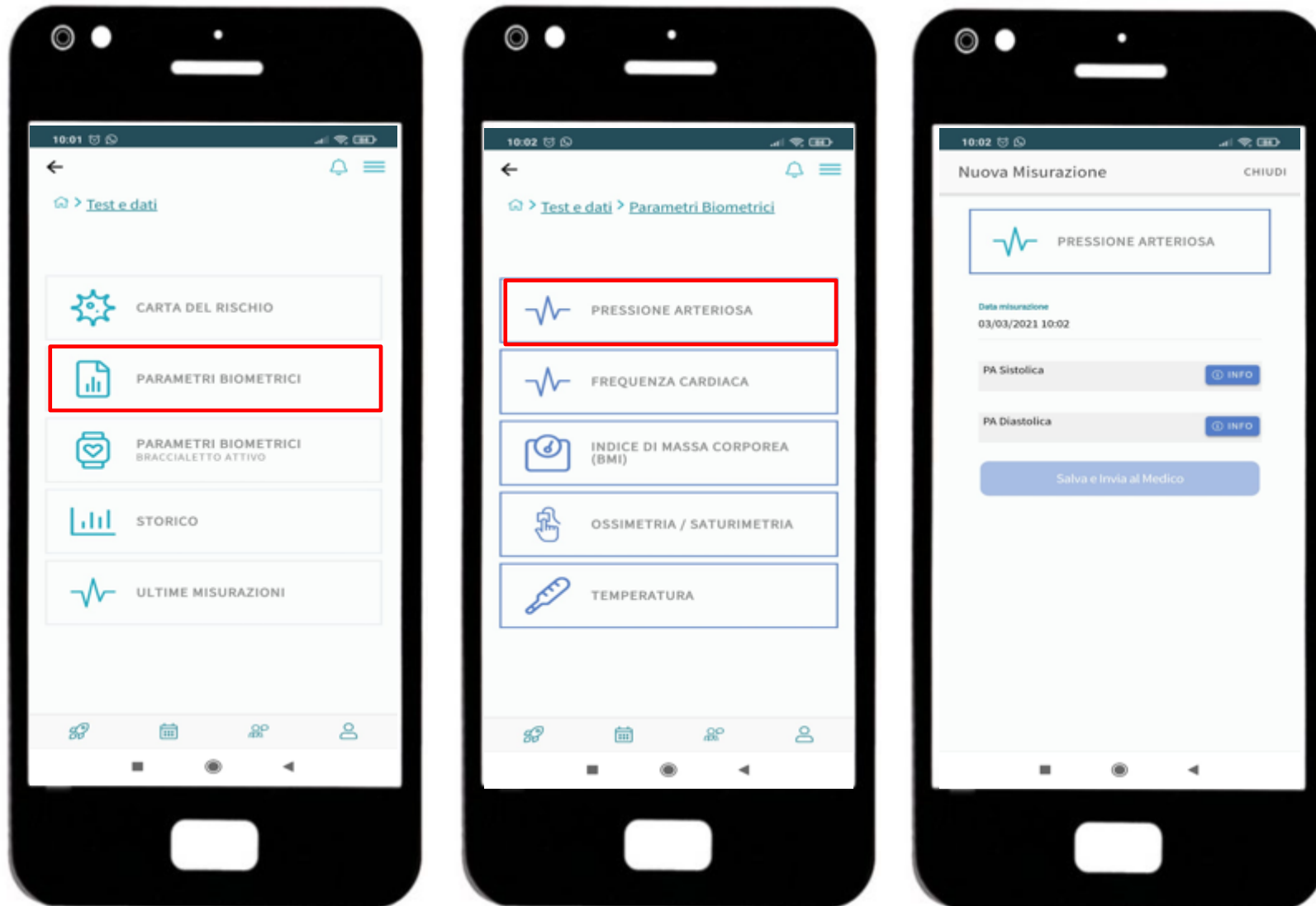


2.2.3.2 - Mobile App Homepage – Test e Dati – Parametri Biometrici

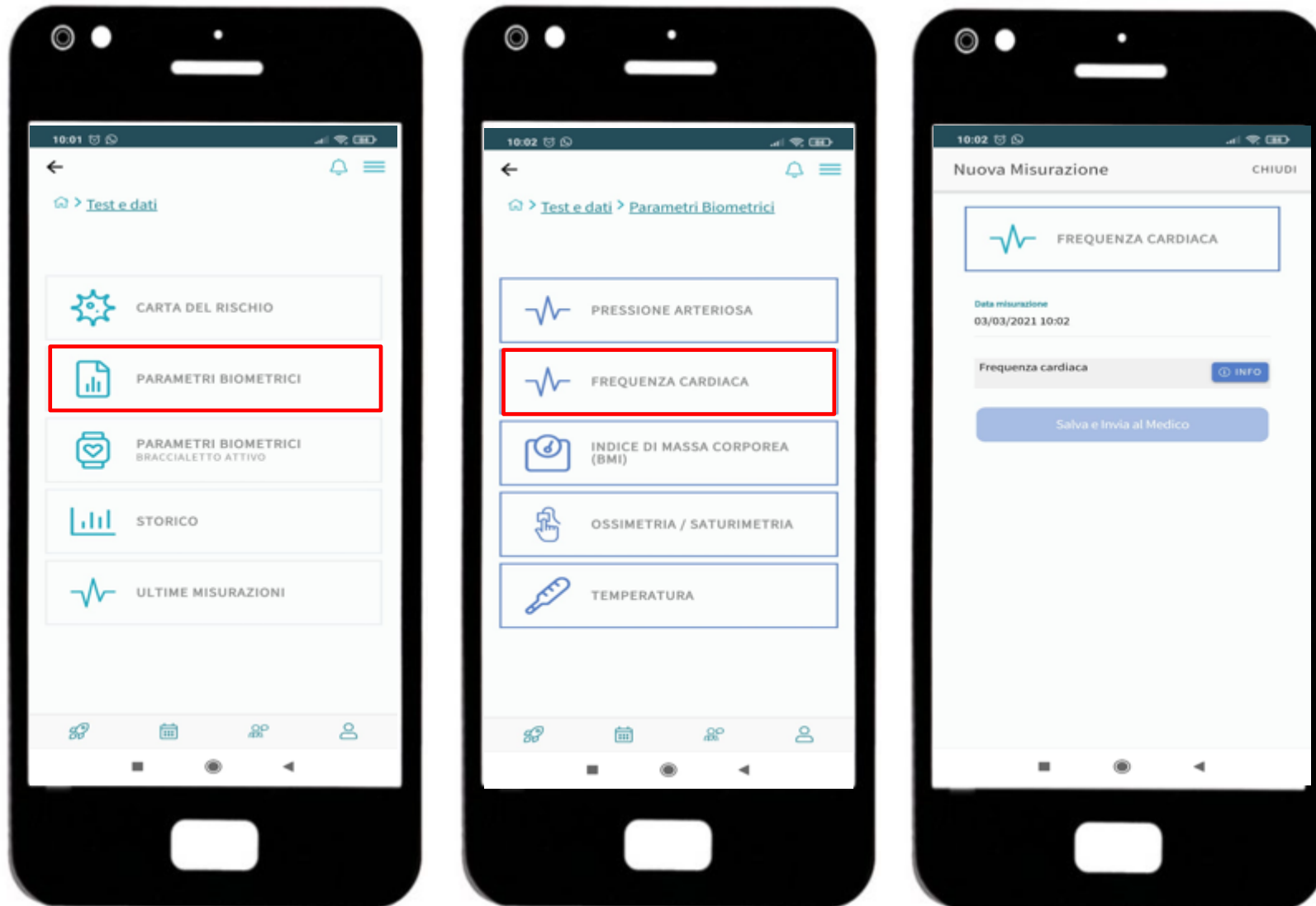


2.2.3.2 - Mobile App Homepage – Test e Dati – Parametri Biometrici

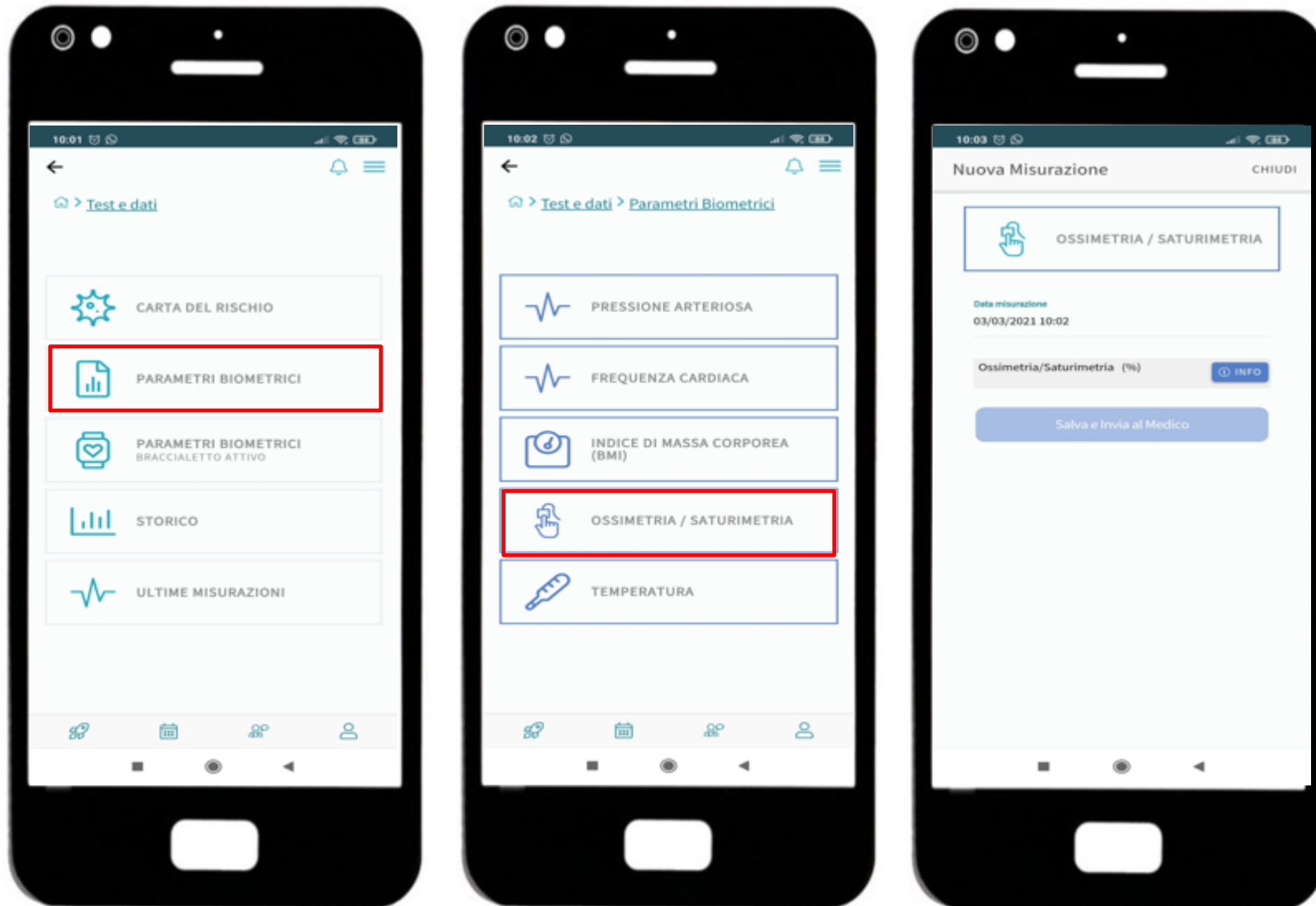

2.2.3.2 - Mobile App Homepage – Test e Dati – Parametri Biometrici

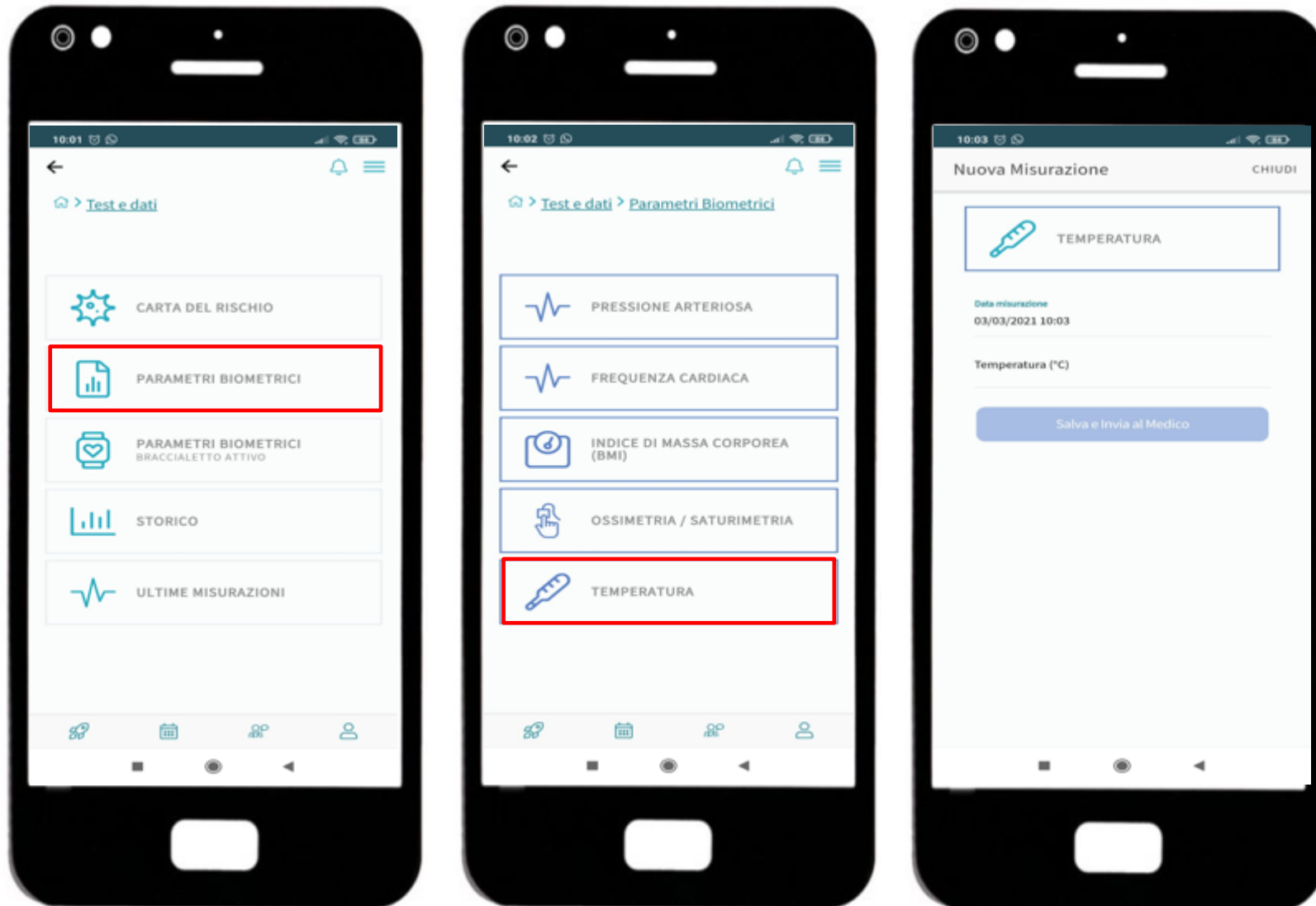


2.2.3.3 - Mobile App Homepage – Test e Dati – Parametri Biometrici Braccialetto

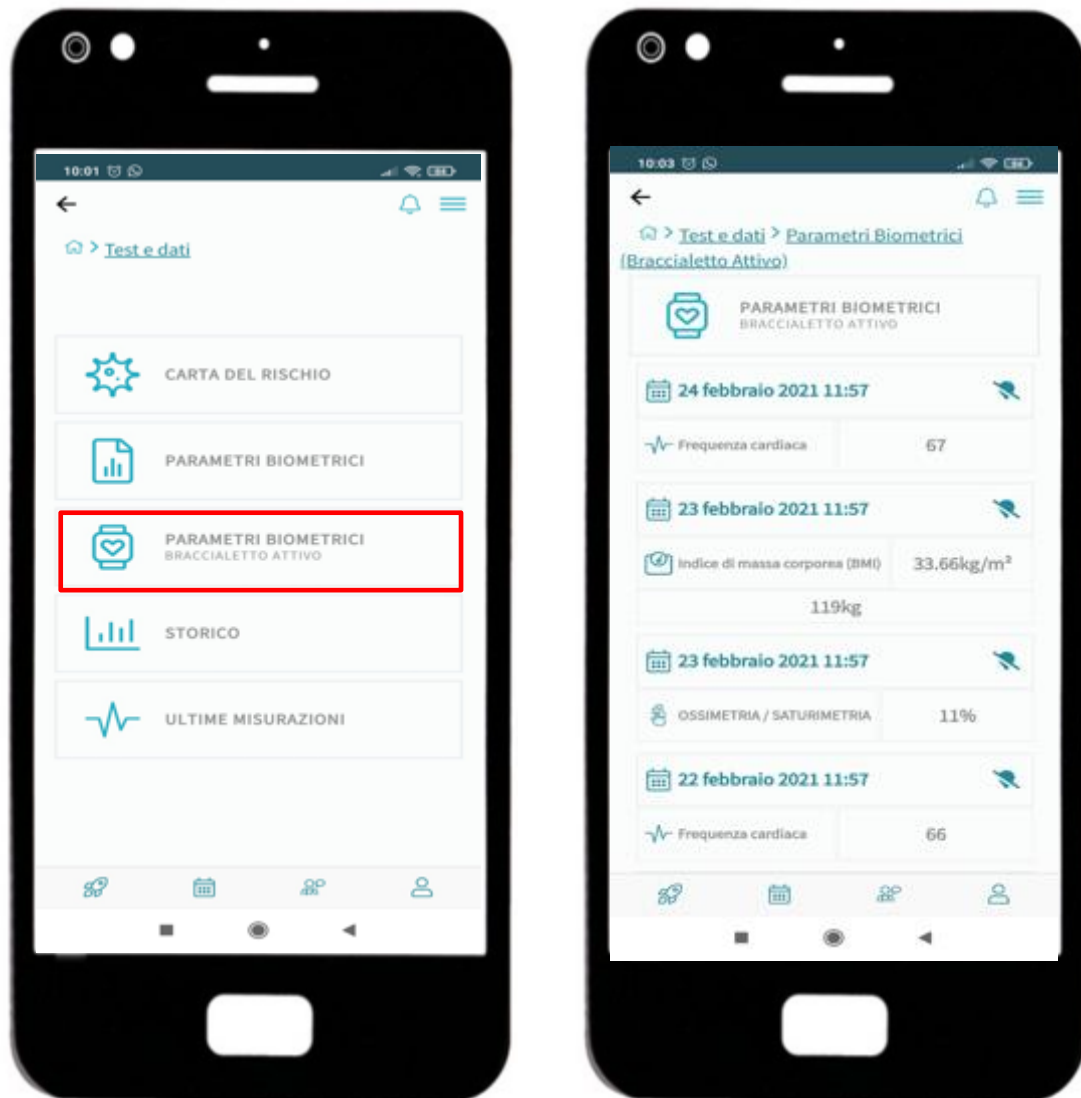

Cliccando su **PARAMETRI BIOMETRICI – BRACCIALETTTO ATTIVO** si consultano i valori misurati automaticamente dal braccialetto sensoriale, se attivato, e riportati cronologicamente nella sezione apposita della app:


- FREQUENZA CARDIACA
- OSSIMETRIA / SATURIMETRIA
- TEMPERATURA

2.2.3.4 - Mobile App Homepage – Test e Dati – Storico

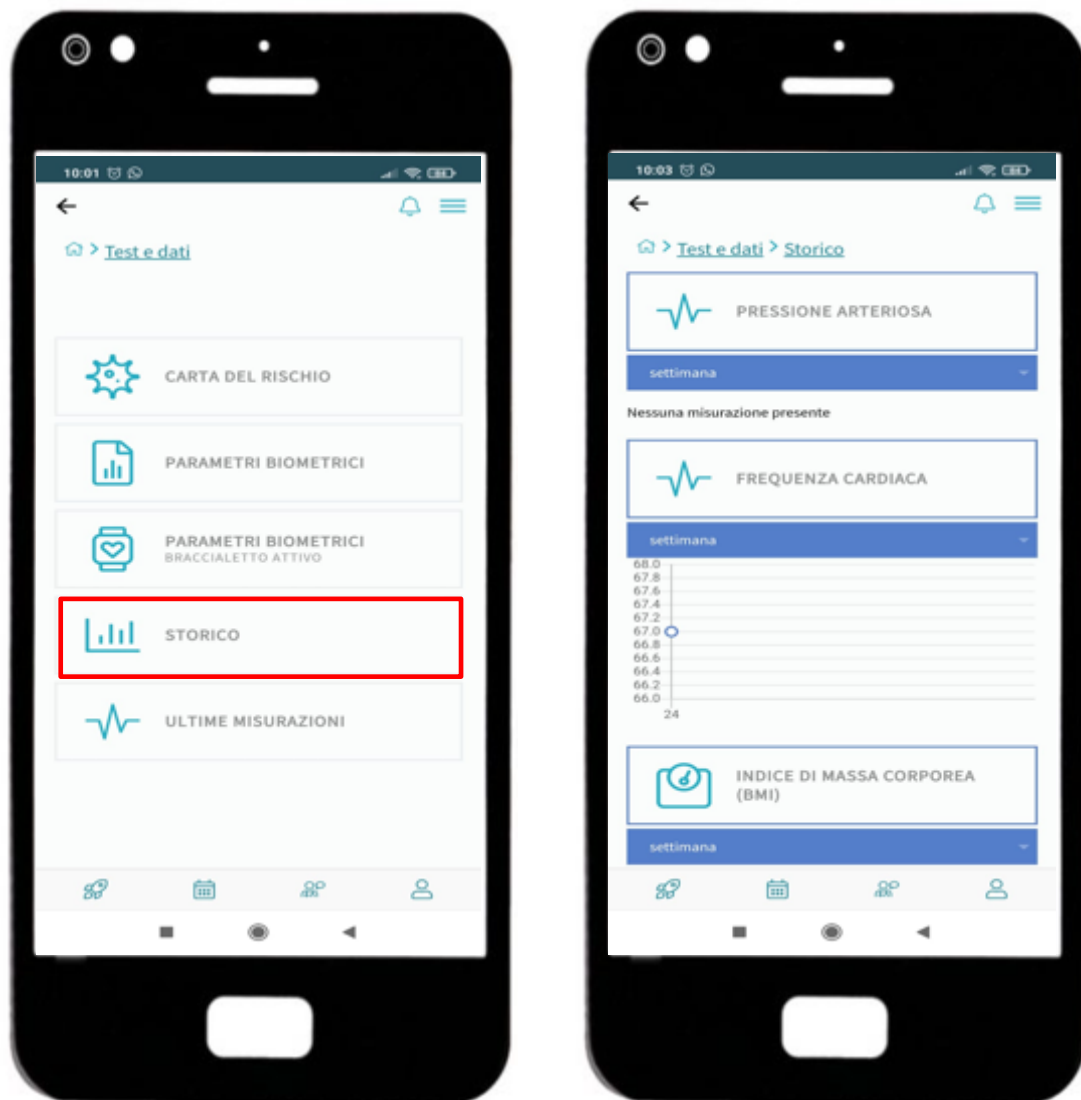

Cliccando su **STORICO** si il paziente può consultare tutti i valori misurati, riportati cronologicamente nelle apposite sezioni ed espressi anche in andamento su grafico.


2.2.3.5 - Mobile App Homepage – Test e Dati – Ultime misurazioni

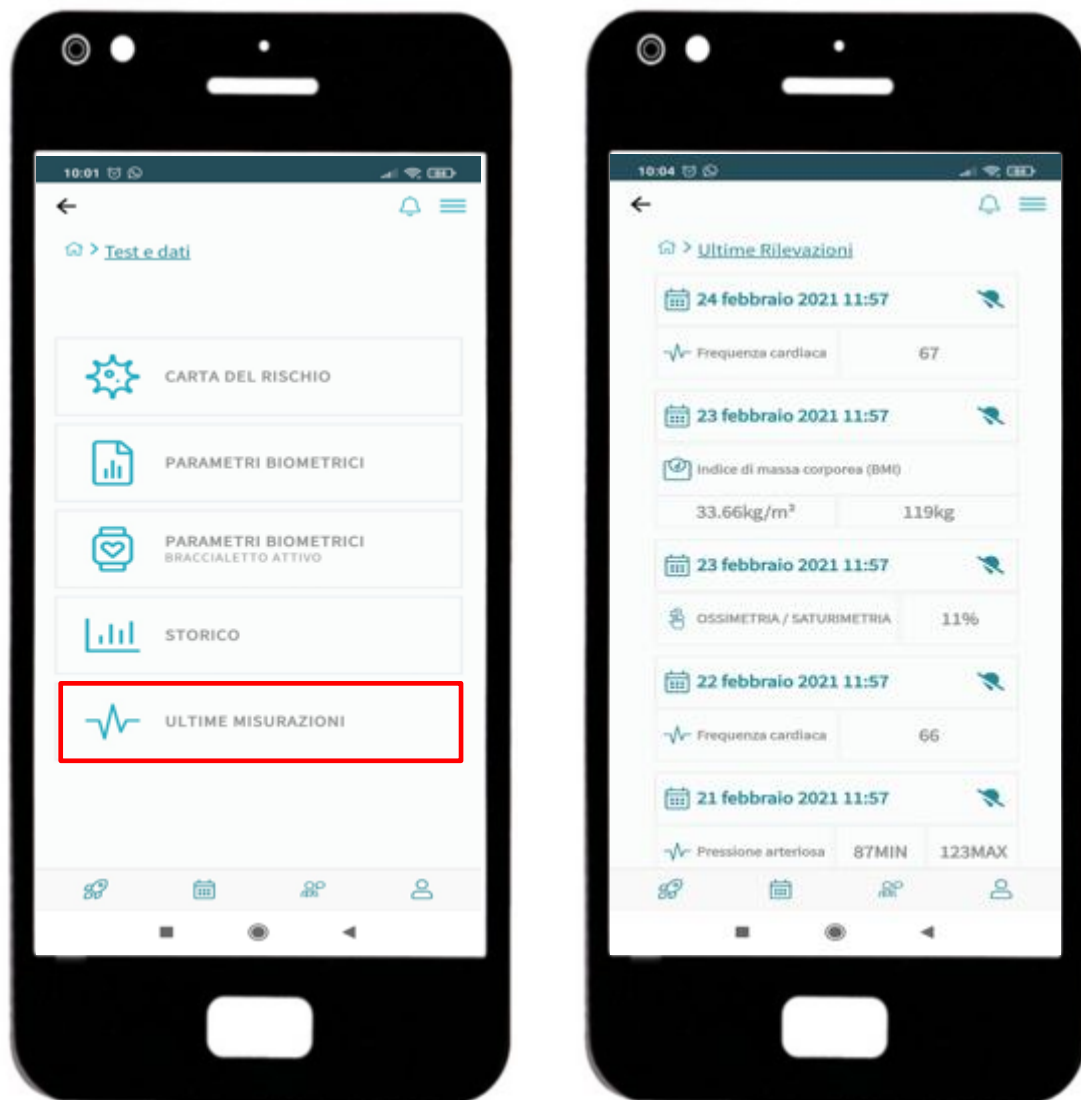

Cliccando su **ULTIME MISURAZIONI** il paziente può consultare tutti i valori misurati, riportati in sequenza cronologica.

2.2.4 Paziente – Agenda Appuntamenti

2.2.4 - Mobile App Homepage – Agenda Appuntamenti

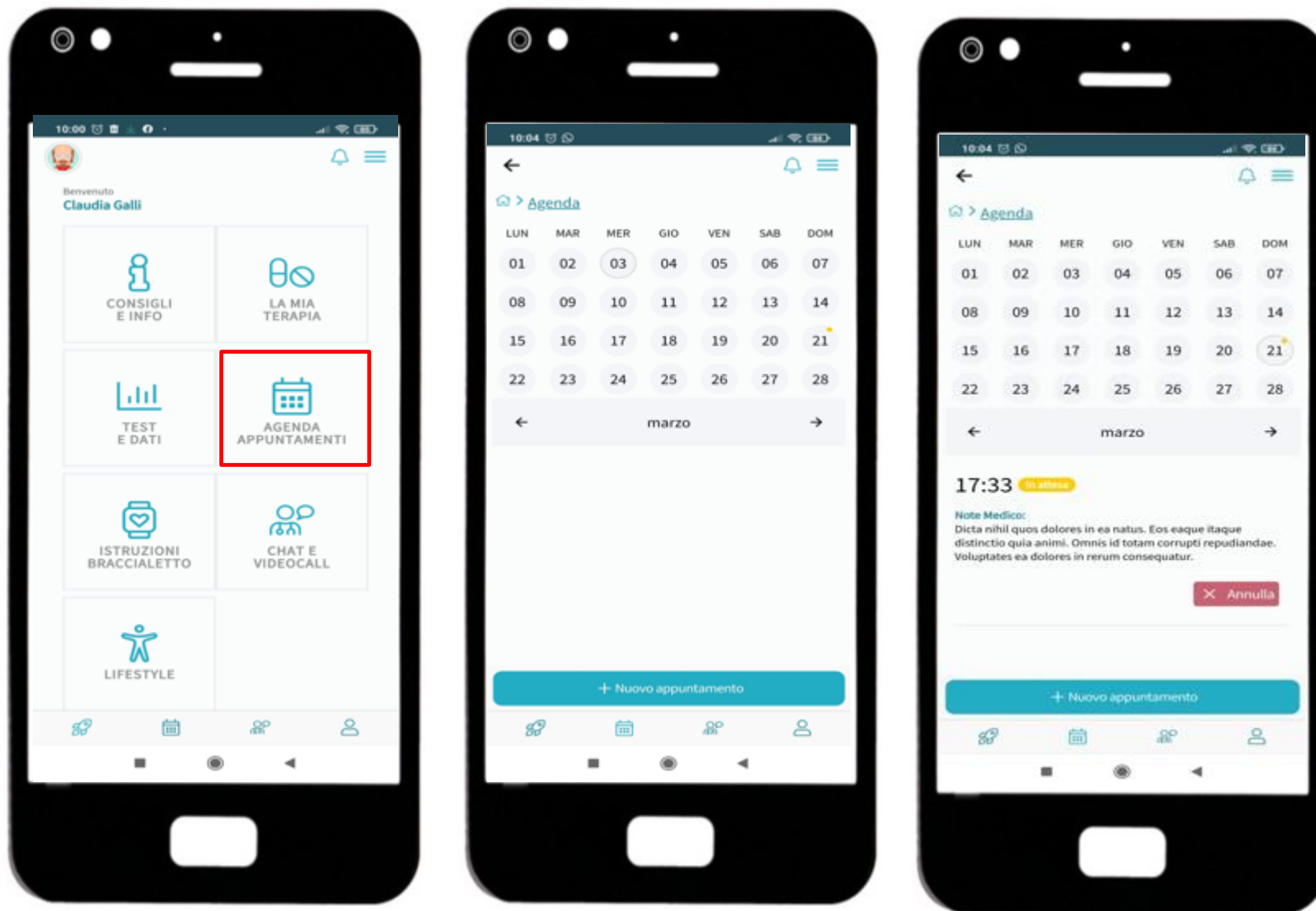


Cliccando sull'icona “**Agenda**” si accede all’agenda degli appuntamenti in attesa di conferma, confermati o annullati da parte del paziente.

È possibile inserire nuovi appuntamenti cliccando su “**Nuovo Appuntamento**”, inserendo data, ora, paziente e tipologia di appuntamento (chat o videochiamata).

Per confermare cliccare su “**Salva Nuovo Appuntamento**”.

2.2.5 Paziente – Istruzioni Braccialeto


2.2.5 - Mobile App Homepage – Istruzioni Braccialetto

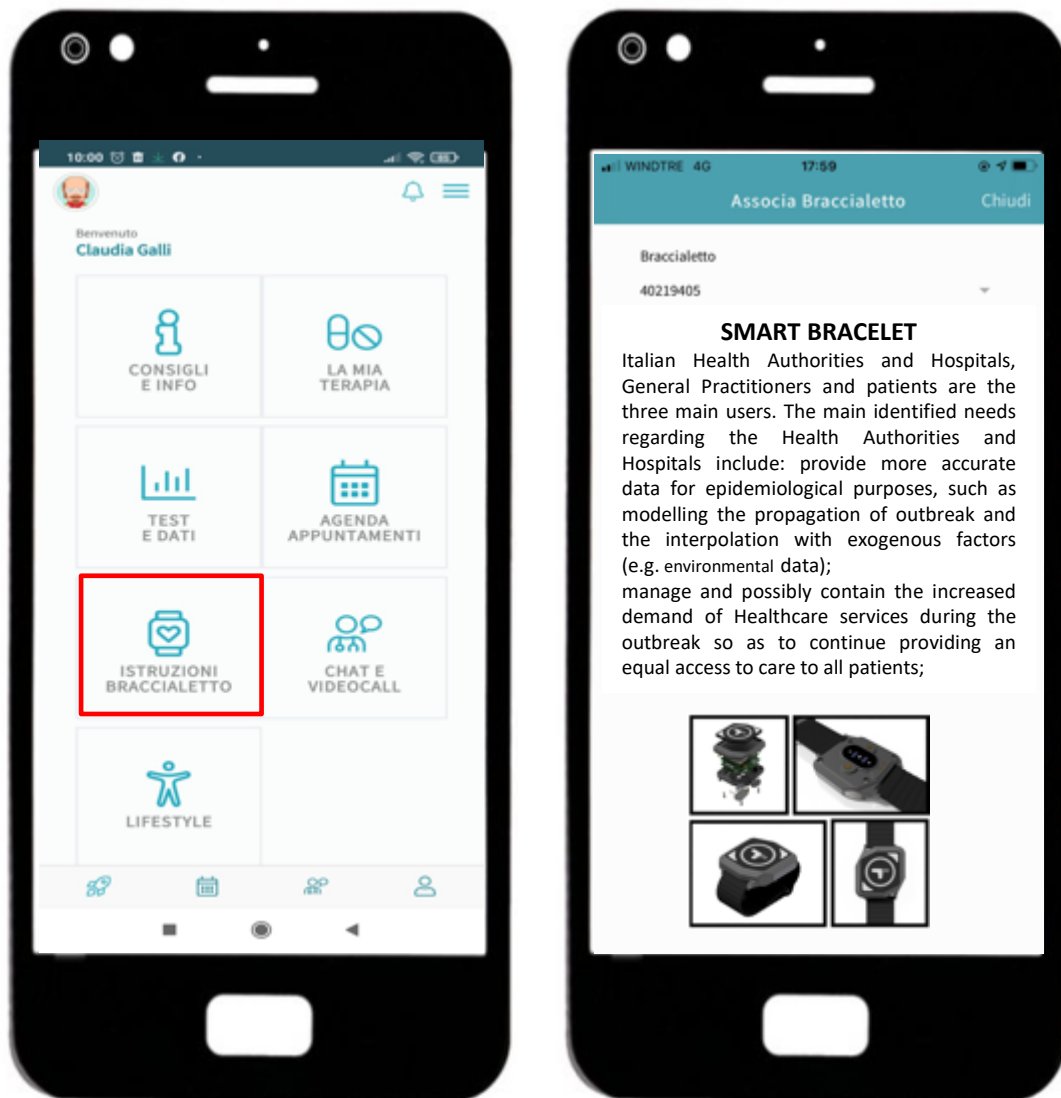

Cliccando su **ISTRUZIONI BRACCIALETTO** il paziente può consultare le istruzioni per il corretto utilizzo del braccialetto avuto in dotazione per il monitoraggio dei parametri biometrici


2.2.6 Paziente – Chat e Videocall

2.2.6 - Mobile App Homepage – Chat e Videocall

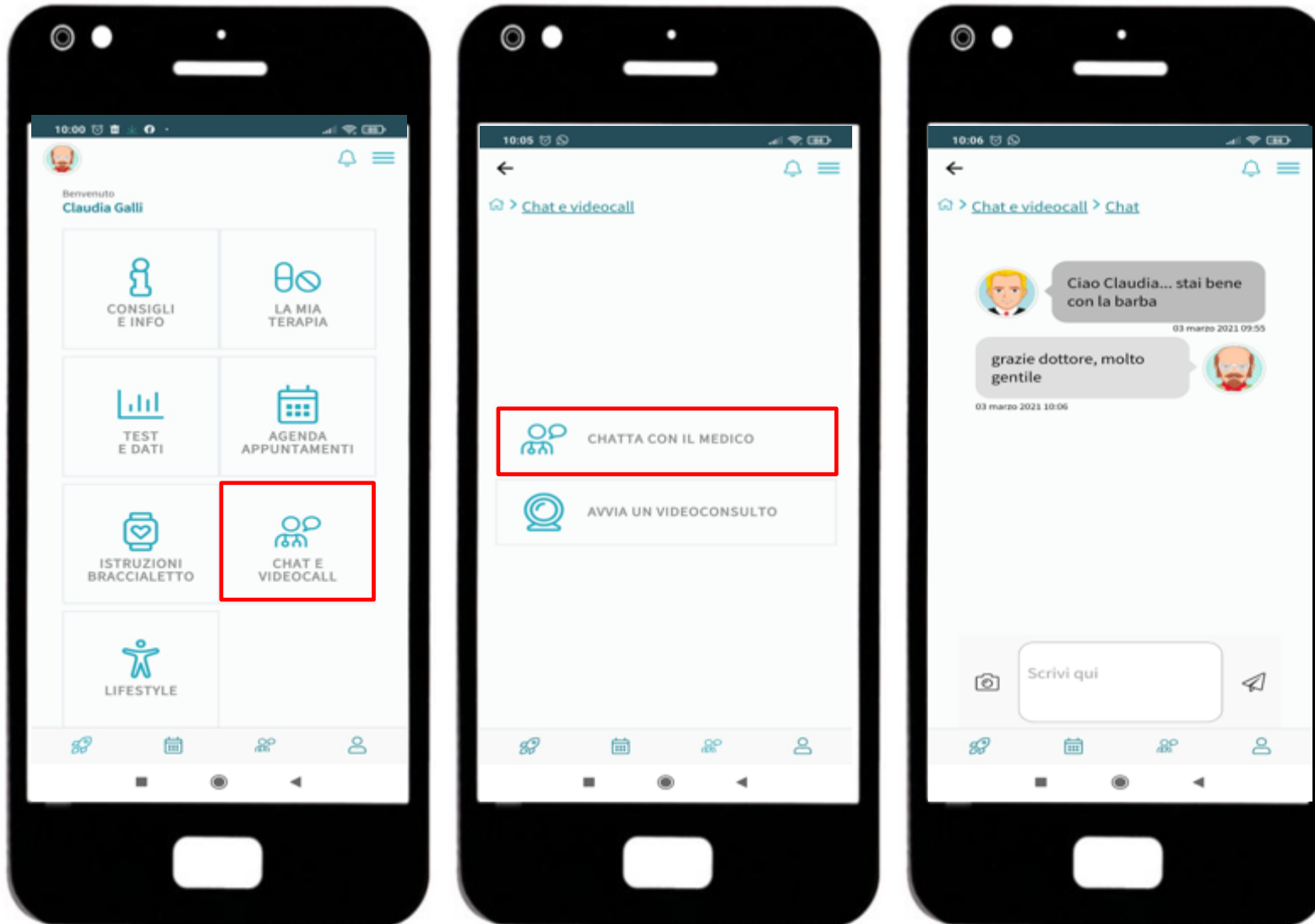

Cliccando su **CHAT E VIDEOCALL** il paziente accede allo spazio di interazione diretta con il medico.


2.2.6 - Mobile App Homepage – Chat e Videocall

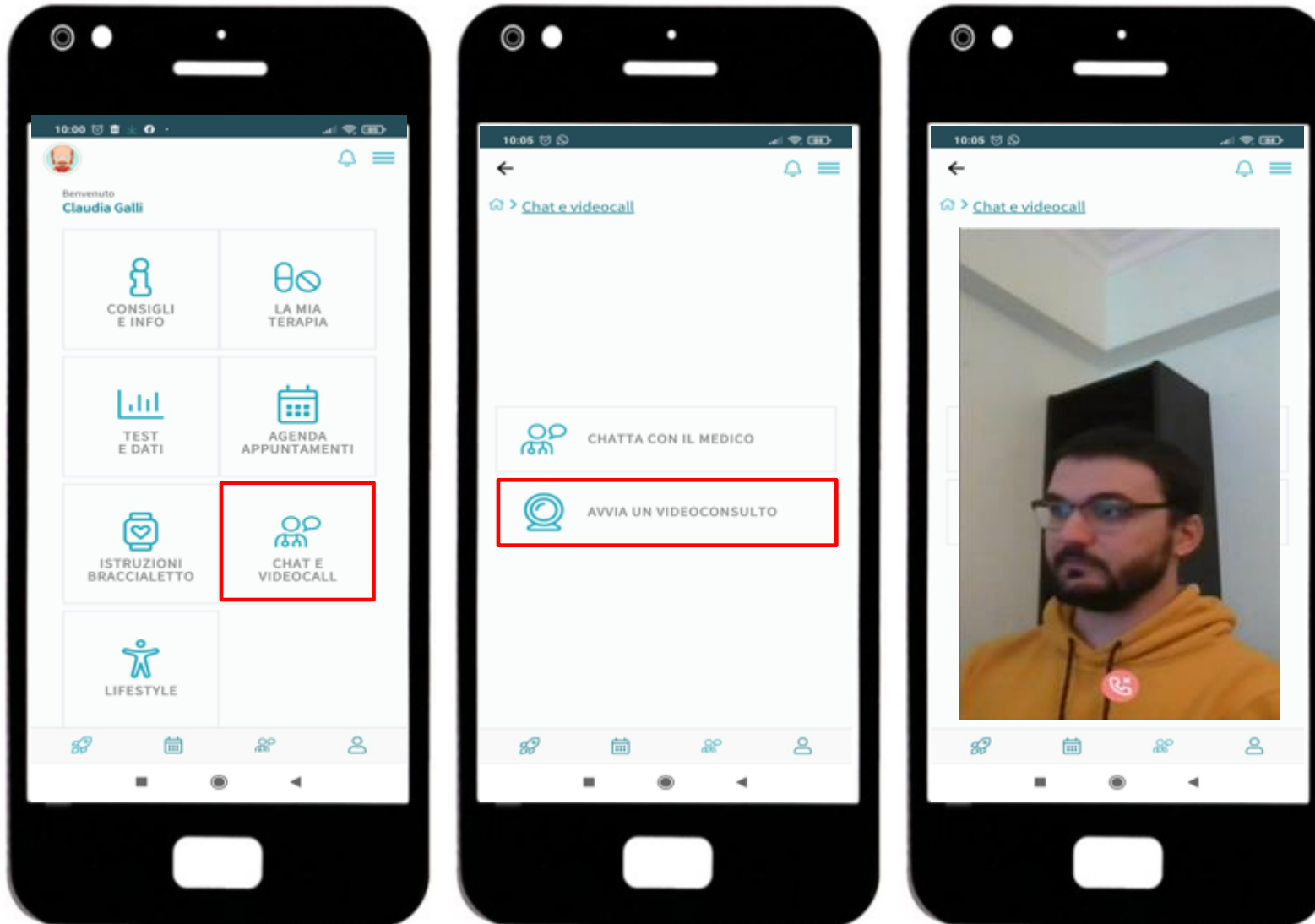

Cliccando su **AVVIA UN VIDEOCONSULTO** il paziente accede allo spazio di collegamento video con il medico

2.2.7 Paziente – Life Style

2.2.7 - Mobile App Homepage – Lifestyle

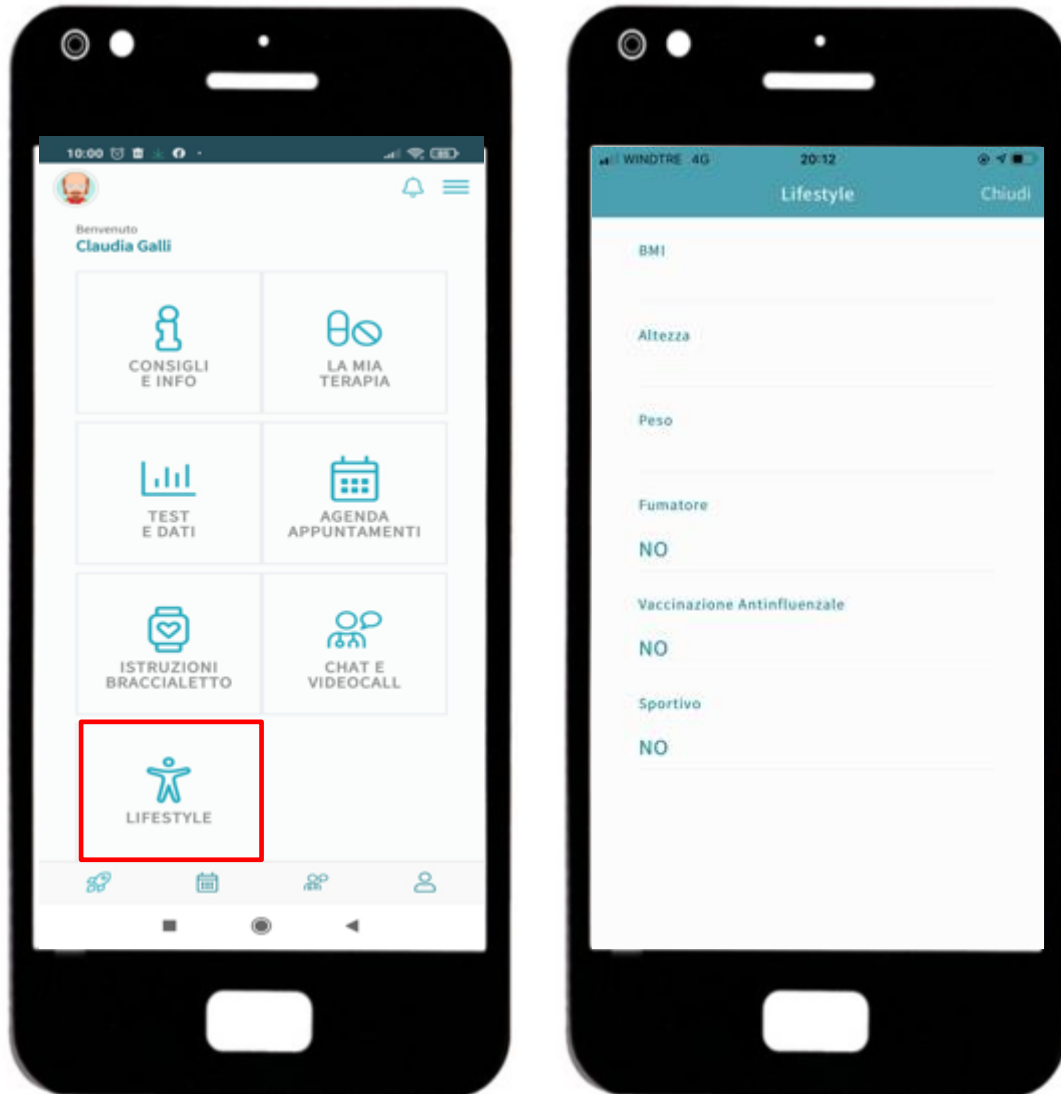

Cliccando su **LIFESTYLE** il paziente può inserire le notizie riguardanti il suo stile di vita